

# Moveo S.r.l.

Via Monsignor G. Fortin, 38

35128, Padova, Italia

+39 049 26144 27

P.I. VAT IT 05236760285

info@moveowalks.com

[moveowalks.com](http://moveowalks.com)



## Ficha técnica ExoBand

### DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO

Para garantizar la efectividad, la tolerancia y el funcionamiento adecuado del dispositivo, debe aplicarse con el máximo cuidado. Cualquier modificación estructural del dispositivo debe ser recomendada únicamente por personal calificado. En caso de dolor, hinchazón, inflamación o cualquier otra reacción anormal, consulte inmediatamente a su médico.



El dispositivo médico está diseñado exclusivamente para apoyar la marcha humana. Cualquier uso en otras circunstancias está estrictamente desaconsejado (por ejemplo, al conducir un automóvil, montar en moto o bicicleta, nadar, etc.). Cualquier daño resultante de un uso indebido será responsabilidad exclusiva del cliente. El dispositivo consiste en un cinturón, dos correas para los muslos y dos tensores que, en combinación con la guía dentada, conectan estas partes. El dispositivo está disponible en cinco tamaños intercambiables (XS, S, M, L, XL).

**Dispositivo médico de clase I.**

## USO PREVISTO Y NO PREVISTO DEL DISPOSITIVO

### Ámbito de aplicación y uso previsto

- Ortesis de cadera para apoyar y mejorar la marcha en personas con discapacidades motoras causadas por enfermedades y condiciones de salud invalidantes, incluidas las trastornos neurológicos (por ejemplo, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedades neuromusculares, enfermedades cerebrovasculares, secuelas de traumatismos del sistema nervioso central, parálisis cerebral) o condiciones ortopédicas.
- Ortesis de cadera para facilitar la marcha en personas con retrasos motores causados por enfermedades y/o condiciones de salud invalidantes.
- Ortesis de cadera para mejorar una postura incorrecta o patológica.

### Uso no previsto

No se permite el uso del dispositivo fuera de los casos descritos en la sección "ÁMBITO DE APLICACIÓN Y USO PREVISTO" del manual. En caso de uso por personas con afecciones graves, como tumores del aparato locomotor, trastornos neuromusculares, enfermedades de la columna vertebral, hernias, etc., se recomienda una evaluación médica. Además, está estrictamente prohibido:

- Uso por personas que no han leído el manual
- Uso por mujeres embarazadas

### Limitaciones del dispositivo médico

- El dispositivo médico no es capaz de corregir deformidades graves de la columna vertebral (dismorfismos) ni otros dismorfismos; solo puede reducir sus efectos.
- El dispositivo médico puede usarse durante un período prolongado, siempre que no presente signos de rasgaduras o daños que puedan comprometer su estructura, seguridad o funcionamiento adecuado. En ese caso o si hay dudas, se recomienda consultar al vendedor de inmediato.
- El dispositivo médico puede alcanzar su máxima eficacia después de un período gradual de uso, dependiendo del estado físico y psicológico del usuario.

### Limpieza



El lavado a mano, el lavado a máquina o la desinfección con un spray desinfectante para tejidos técnicos está permitido, como se indica en la sección "Limpieza" del manual de usuario. No utilice blanqueadores ni otros productos químicos agresivos que puedan dañar el dispositivo.

- La utilización del ciclo de centrifugado está prohibida.
- Revise regularmente el estado del dispositivo para asegurarse de que no haya daños o signos de desgaste que puedan afectar su funcionamiento adecuado.
- No planchar.
- Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante para el mantenimiento y cuidado del dispositivo.

**UDI-DI base: 805934045EXOBAND0003N**

**Código EMDN: Y061215**

**Descripción EMDN: Ortesis de cadera (incluida ortesis de abducción de cadera)**

**Código REF: EXOBAND**

**Código GMDN: 36228 (Ortesis de cadera)**