

# Moveo S.r.l.

Via Monsignor G. Fortin, 38

35128, Padova, Italia

+39 049 26144 27

P.I. VAT IT 05236760285

info@moveowalks.com

[moveowalks.com](http://moveowalks.com)



## Technisches Datenblatt ExoBand

### BESCHREIBUNG DES MEDIZINISCHEN GERÄTS

Um die Wirksamkeit, Verträglichkeit und ordnungsgemäße Funktion des Geräts zu gewährleisten, muss es mit größter Sorgfalt angewendet werden. Jegliche strukturelle Änderung des Geräts sollte nur von qualifiziertem Personal empfohlen werden. Bei Schmerzen, Schwellungen, Entzündungen oder anderen abnormalen Reaktionen wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.



Das medizinische Gerät ist ausschließlich zur Unterstützung des menschlichen Gehens bestimmt. Jede Verwendung in anderen Umständen wird dringend abgeraten (z. B. beim Fahren eines Autos, Motorrad- oder Fahrradfahrens, Schwimmen usw.). Jegliche Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, liegen in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Das Gerät besteht aus einem Gürtel, zwei Oberschenkelriemen und zwei Spannvorrichtungen, die, in Kombination mit der Zahnstange, diese Teile miteinander verbinden. Das Gerät ist in fünf austauschbaren Größen erhältlich (XS, S, M, L, XL).

**Medizinisches Gerät der Klasse I.**

## VORGESEHENE UND NICHT VORGESEHENE VERWENDUNG DES GERÄTS

### Anwendungsbereich und vorgesehene Verwendung

- Hüftorthese zur Unterstützung und Verbesserung des Gehens bei Personen mit motorischen Beeinträchtigungen, die durch invalidisierende Krankheiten und Gesundheitszustände verursacht werden, einschließlich neurologischer Störungen (z. B. Parkinson-Krankheit, Multiple Sklerose, neuromuskuläre Erkrankungen, zerebrovaskuläre Erkrankungen, Folgen von Traumata des zentralen Nervensystems, zerebrale Lähmung) oder orthopädischer Erkrankungen.
- Hüftorthese zur Erleichterung des Gehens bei Personen mit motorischen Verzögerungen, die durch invalidisierende Krankheiten und/oder Gesundheitszustände verursacht werden.
- Hüftorthese zur Verbesserung einer falschen oder pathologischen Haltung.

### Nicht vorgesehene Verwendung

Es ist keine Verwendung des Geräts außerhalb der in der Rubrik "ANWENDUNGSBEREICH UND VORGESENE VERWENDUNG" des Handbuchs beschriebenen Anwendungsfälle erlaubt. Bei der Verwendung durch Personen mit schweren Erkrankungen wie Tumoren des Bewegungsapparates, neuromuskulären Störungen, Wirbelsäulenerkrankungen, Hernien usw. wird eine medizinische Bewertung empfohlen. Es ist außerdem strengstens untersagt:

- Verwendung durch Personen, die das Handbuch nicht gelesen haben
- Verwendung durch schwangere Frauen

### Einschränkungen des Medizinprodukts

- Das Medizinprodukt ist nicht in der Lage, schwere Wirbelsäulendeformitäten (Dysmorphismen) oder andere Dysmorphismen zu korrigieren; es kann nur deren Auswirkungen verringern.
- Das Medizinprodukt kann über einen längeren Zeitraum verwendet werden, solange keine Anzeichen von Rissen oder Schäden vorhanden sind, die seine Struktur, Sicherheit oder ordnungsgemäße Funktion gefährden könnten. In diesem Fall oder bei Zweifeln wird empfohlen, sofort den Verkäufer zu konsultieren.
- Das Medizinprodukt kann seine maximale Wirksamkeit nach einer schrittweisen Nutzungsdauer erreichen, die vom physischen und psychologischen Zustand des Benutzers abhängt.

### Reinigung



Handwäsche, Maschinenwäsche oder Desinfektion mit einem Desinfektionsspray für technische Stoffe sind erlaubt, wie in der Rubrik "Reinigung" des Benutzerhandbuchs angegeben. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder andere aggressive Chemikalien, die das Gerät beschädigen könnten.

- Die Verwendung eines Schleudergangs ist untersagt.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Geräts, um sicherzustellen, dass keine Schäden oder Abnutzungsspuren vorhanden sind, die seine ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen könnten.
- Nicht bügeln.
- Befolgen Sie stets die spezifischen Anweisungen des Herstellers für die Wartung und Pflege des Geräts.

**Basis-UDI-DI: 805934045EXOBAND0003N**

**EMDN-Code: Y061215**

**EMDN-Beschreibung: Hüftorthese (einschließlich Hüftabduktionsorthese)**

**REF-Code: EXOBAND**

**GMDN-Code: 36228 (Hüftorthese)**